

	EQUIPOS EN TRÁNSITO	Instructivo IT – STE-11
---	----------------------------	----------------------------

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE EQUIPOS A REPARAR EN MEDIO MEDICO

Para el envío de instrumentos a reparar en las instalaciones de Medio Medico, se deben seguir los siguientes pasos y recomendaciones relacionadas a la Bioseguridad y cuidado del instrumento.

• **DESCONTAMINACIÓN:**

- **Descontaminar la superficie** del equipo en contacto con cualquier individuo con ALCOHOL AL 70% y un paño limpio o papel. **PRECAUCIÓN: No mojar pantallas táctiles o elementos electrónicos sensibles a la humedad.**
- **Descontaminar recipientes de Desechos Biológicos** con HIPOCLORITO DE SODIO DILUIDO AL 5% y enviarlos vacíos.

• **RECOMENDACIONES PARA EL TRASLADO:**

- ANTES DEL ENVÍO, consultar con Servicio Técnico que accesorios e insumos deben enviarse junto con el instrumento.
- INMOVILIZAR TODAS LAS PARTES del equipo que puedan sufrir golpes o algún daño en el traslado.
- PROTEGER PANTALLAS O ELEMENTOS SALIENTES (ej. agujas) que puedan dañarse o causar daño.
- REACTIVOS EMBALADOS POR SEPARADO DEL EQUIPO Y PERFECTAMENTE CERRADOS. Serán necesarios aquellos que Servicio Técnico indique enviar para su funcionamiento y prueba del equipo
- FIJAR CARCASAS o partes que puedan desprenderse durante el traslado.
- UTILIZAR LA SIGUIENTE ETIQUETA

Elaboró:  MEDIO MEDICO S.R.L. Diego Pérez Machado RESPONSABLE DE STE	Revisó: MEDIO MEDICO S.R.L.  Dr. Luis Emilio Retamar DIRECTOR TÉCNICO Mat. 2148	Aprobó:  MEDIO MEDICO S.R.L. Inga Mburicio Córdoba SUCEO GERENTE	Pág: 1 de 3	Versión N°: 02
Fecha de Vigencia: 01/06/2020				

ETIQUETA DE ENVIO**MEDIO MEDICO S.R.L.****Servicio Técnico**

Pasco 3250 – Rosario (2000) – Santa Fe

Teléfono: 0341-480 5000/1/2/3/4

RTE:

Razón Social: _____

Contacto: _____ Teléfono: _____

Dirección: _____

Fecha recepción en MM: _____ Receptor: _____



(Cortar y enviar dentro del embalaje del instrumento)



		Fecha de Envío:	
Instrumento:		Nro. de Serie:	
Motivo:			
ACCESORIOS ENVIADOS			
PARTES		DETALLE	
Cables:			
Tuberías:			
Reactivos/Consumibles:			
Otros:			

(Medio Médico NO se hace responsable por los elementos no declarados por el Cliente)

Firma Responsable del Envío

Aclaración

Histórico de Revisiones

Fecha	Versión N°	Rev. N°	Modificaciones	Realizó
15/10/2016	01	01	Sin modificaciones	Diego Perez Machado
18/06/2018	01	02	Sin modificaciones	Diego Perez Machado
01/06/2020	02	01	Hoja 1. Recomendaciones de Descontaminación y Traslado	Diego Perez Machado